

MASCHERINE IGIENICHE PROTETTIVE MONOUSO



Tessuto non tessuto 100% Propilene.
Ha un buon potere filtrante di particelle a partire da 1-5 Micron
Non è un dispositivo di protezione individuale (DPI).
Non è un dispositivo medico (DM).



Le mascherine igieniche sono mascherine monouso utilizzabili per limitare la diffusione di agenti inquinanti o infettivi da persona a persona durante le normali attività. Non hanno un sistema filtrante e non possono sostituire mascherine classificate in ambito sanitario come dispositivi di protezione individuale. Le mascherine utilizzate a scopo igienico, non sono dispositivi di protezione pensati per ridurre i rischi di infezione in ambito sanitario. Sono utili perché proteggono da schizzi e secrezioni grossolane, ma non garantiscono protezione dall'aerosol infetto di una persona contagiata.

Si possono quindi utilizzare quando non si hanno specifiche necessità come in ambito medico e quando una protezione inferiore è pur sempre preferibile a non avere nessun dispositivo di protezione.

La disposizione in parola consente a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid 19 di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI.

Specifiche e materiali di composizione

Sono progettate per garantire il massimo livello di comfort, permettono di proteggere naso e bocca e sono in grado di trattenere particelle aventi diametro superiore 1-5 micron.

Come indossare le mascherine igieniche

Per indossare la mascherina è necessario renderla aderente al viso per avere una protezione maggiore. Modella la mascherina in modo che aderisca bene al naso e sistema la mascherina sul viso coprendo bene naso e bocca per limitare gli spifferi. La mascherina ha due elastici auricolari che vanno posizionati intorno alle orecchie.

Come utilizzarle correttamente

Le mascherine devono essere indossate sempre in maniera corretta, altrimenti non solo diventano inutili, ma anche controproducenti.

Ecco alcune regole da seguire:

- Lava le mani con acqua e sapone o strofinale con una soluzione alcolica prima di indossare la mascherina;
- Evita di toccarla mentre la indossi, prendendola dall'elastico;
- Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e se necessario, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone;
- Quando diventa umida, sostituiscila con una mascherina nuova e non riutilizzata;
- Togli la mascherina prendendola dall'elastico e rimuovila da dietro, non toccare la parte anteriore;
- Buttala immediatamente in un contenitore chiuso o in un sacchetto e pulisci le mani con o acqua e sapone o con un detergente a base di alcool

Quando devono essere sostituite

Quando vengono utilizzate per proteggersi dall'inquinamento da polveri sottili in città, le mascherine protettive possono essere utilizzate per più giorni.

Ricorda però di sostituirle appena mostrano segni di cedimento o quando vengono esposte a umidità o temperature che possono averle danneggiate.

Utilizzare invece le mascherine per proteggersi dai virus non è sempre efficace, perché sono più importanti e sicure le normali abitudini igieniche. Se, però, decidete di utilizzarne una a questo scopo, ricordatevi di cambiarla più spesso perché tende a inumidirsi e a deformarsi. In questo caso si raccomanda anche di rispettare la distanza di un metro fra le persone come principale criterio di contenimento dei virus e la detersione frequente e corretta delle mani. L'uso delle mascherine è raccomandato in assenza della possibilità di mantenere la distanza e l'uso della mascherina può aiutare a limitare la diffusione del virus ma solo in aggiunta alle misure di igiene respiratoria e delle mani.

Non è utile indossare più mascherine sovrapposte.